

PROTEIN KALINTI TESTİ

Ürün tanımı

Cerrahi aletlerin düzgün temizliğindeki ilk adım tüm kan, vücut sıvı ve dokusunun kullanım sonrası hemen çıkarılmasıdır. Temizlik yeterli seviyede yapılmaz ise dezenfeksiyon aşamasının etkinliğini düşürerek önceki hastalardan kalan vücut sıvısı ve dokusu nedeniyle patojen geçişine sebebiyet verir ve çok sayıda insanın etkilenmesine neden olur. Ürünümüz olmayan temizlik sonrası kalan protein kalıntılarını tespit ederek cerrahi aletlerin temizliğini kontrol etmek üzere tasarlanmıştır.

Sistem yüksek absorpsiyonlu numune alıcısı sayesinde aynı etkinlikle farklı yüzeylerden numune alınmasına imkan tanır. Sistem, endoskop ve diğer ulaşılması güç dahili kanalları olan veya kanüllü tekrar kullanılabilir aletlerin temizlik doğrulaması ile uyumludur.

Renk değişiminin görsel okuması tespit edilebilir seviyede protein kalıntısına işaret eder. Ürünümüz yüksek hassasiyete sahip olup 1 µg protein miktarına kadar tespit yapabilmektedir.

Özellikler

Kalıntı protein testi için tüm gerekli ekipmanı sağlamaktadır.

Kullanım endikasyonları

Dişli kenarları olan, kutu bağlantıları ve endoskop kanalları veya kanüllü aletler gibi kompleks aletlerin ulaşılması güç alanlarında temizlik sonrası kullanın.

Önlemler

Tekrar kullanmayın. Kullanım anına kadar açmayın. Swab ucuna elinizle dokunmayın. Eldiven giyin, cerrahi maske takın ve derinizden protein artıklarının çapraz-kontaminasyonunu önlemek için diğer hijyen kurallarına uyun. Dondurmayın. Yüksek hassasiyete sahiptir ancak mikrobiyolojik izleme cihazı değildir, dolayısıyla yüzeyler elde edilen sonuçlar bazında steril olarak değerlendirilemez.

Kullanım Yönergeleri

1. Alüminyum poşet dikkatlice açılır. Swap ve test tüpü paketten çıkarılır.
2. Swap paketten çıkarılarak test edilen yüzeye dikkatlice sürün.
3. Tüp kapağını açın, swabı reaktif kolorimetrik solüsyon içine daldırarak 15 saniye içinde döndürün. **ÖNEMLİ:** Swabı tüp duvarlarına doğru itmeyin, sadece daldırın ve bekleyin. Hidrasyon veya daldırma işlemi yanlış yapılırsa analiz etkilenebilir.
4. Swabı atın ve reaktif tüpün kapağını tekrar takın.
5. Renk skalası yardımıyla sonuçları görsel olarak yorumlayın. Test sonuç rengini tablodaki renk ile karşılaştırarak yüzey temizliği hakkında tahmin yapılabilir.



ÖNEMLİ: Tavsiye edilen süreler aşıldığında sonuçlar geçersizdir.

NOT: Yüzeylerde karşılaştırılabilir testler gerçekleştirmek için yüzey örnekleme standartlaştırılmalıdır. Bunun için, aynı noktadan 10 cm² alanda 10 kez bir yönde ve 10 kez ilk doğrultuya dik yönde örnek alımı yapın.

Depolama

2-25 °C aralığında karanlık yerlerde depolanmalıdır.

Raf ömrü Soğutulduğunda 24 aydır ve 25 °C'ye kadar oda sıcaklığında depolandığında 6 aydır.

DiaTek Diagnostik Ürünler Teknik Dan. Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.

Adres: Fatih Mah. Yakacık Cad. No:129/1 Diatek Ortadağ Plaza

Sancaktepe / İstanbul **Tel:** +90 216 380 55 73 **Mail:** sales@diatek.com.tr