


HyPass (Antimikrobiyal Dezenfektanlı Paspas)

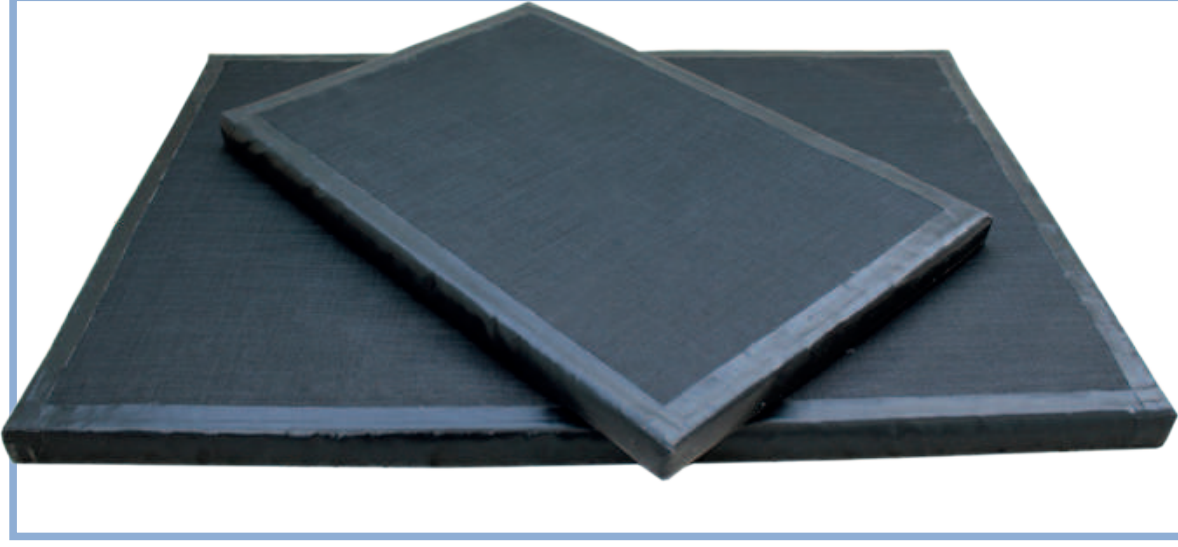

Patentli ürünümüz HyPass, diğer adıyla Antimikrobiyal Dezenfektanlı Paspas, ayakla hijyenik ortamlara taşınan mikroorganizmaları ve diğer kirliliklerin girişini engellemek için kullanılmaktadır. HyPass'in standart ölçüleri 40cm*60cm ve 60cm*85cm olmak üzere iki çeşittir. Farklı ihtiyaçları karşılamak üzere, istenilen ebatlarda üretim yapılabilir.

KULLANIMI

Paspasa uygun miktarda dezenfektan eklenir. Dezenfektan eklenmiş paspas dışarıdan ıslak görünmez. Sadece üzerine basıldığı zaman, farklı yoğunluktaki çift katmanlı bondex sünger sayesinde, paspas üzerine binen ağırlığa orantılı miktarda dezenfektan yüzeye çıkar ve ağırlık kalktığı zaman geri emilir. Emilen dezenfektan süngeri, alt ve yanlardan saran antimikrobiyal kumaş içerisinde tutulur. Süngerin yapısından dolayı içerisinde herhangi bir mikroorganizma ve kir tutunamaz.

HYPASS'te alkol bazlı dezenfektanlar veya çamaşır suyu kullanılmamalıdır. QAC bazlı dezenfektanlar tercih edilebilir. QAC bazlı dezenfektanımız kullanıldığında, 1/10-1/20 oranında dezenfektan/su solusyonu hazırlanır (eğer farklı bir dezenfektan kullanıyorsanız, lütfen talimatlarına uygun hazırlayınız).

40cm*60cm paspas: İlk kullanımda paspas tamamen kuru olduğu için 1,50 lt dezenfektan/su karışımı paspas üzerine yavaşça dökülerek, paspasın sıvıyı emmesi sağlanır. Daha sonraki kullanımlarda paspas tamamen kuru olmayacağı için, bu miktar 1lt olarak ayarlanabilir.

60cm*85cm paspas: İlk kullanımda paspas tamamen kuru olduğu için 3,00 lt dezenfektan/su karışımı paspas üzerine yavaşça dökülerek, paspasın sıvıyı emmesi sağlanır. Daha sonraki kullanımlarda paspas tamamen kuru olmayacağı için, bu miktar 2 lt olarak ayarlanabilir.

- Kullanım sırasında dışarı çıkan dezenfektan miktarı, uygulanan baskıyla orantılı olduğundan gereğinden fazla ıslaklık oluşmaz.
- Kullanılan süngerin yapısından dolayı, kullanım ve temizlik sırasında sünger içerisinde mikroorganizma barınmaz.
- Hem dezenfektan havuzuna yerleştirilerek, hem de tek başına (kaygan zeminler de dahil) kullanılabilir.
- Kullanımı ve temizliği çok kolaydır; özel yapısı sayesinde hem dayanıklılık hem de temizlik bakımından uzun ömürlü bir üründür.


KULLANIM ALANLARI

Gıda Sektörü
İlaç ve Kozmetik Sektörü
Sağlık Sektörü

Oteller, Turistik Tesisler, Spor Merkezleri, Yüzme Havuzları
İş Yerleri
Okullar, Kreşler



HyPass, farklı yoğunluklara sahip çift katmanlı özel kompozit sünger, bu süngeri kaplayan bir filtre, havuz görevi gören özel su geçirmez antimikrobiyal kumaş ve en dışta uzun ömürlü özel bir kaplama malzemesinden oluşmaktadır.


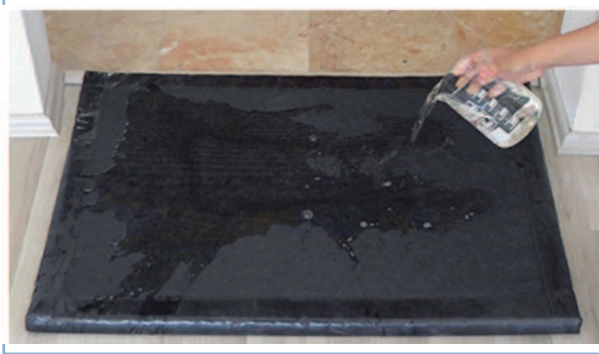


TEMİZLİK

Kullanım sıklığına bağlı olarak paspas içerisindeki dezenfektan değiştirilmelidir. Paspasın temizliği çok kolay ve pratiktir. Dik şekilde tutulan paspasın içerisinde bulunan kirli dezenfektanın, su yardımıyla tamamen akıtılması ve bir süre, kuruması için bekletilmesi yeterlidir. Kullanılan malzemelerin özelliklerinden dolayı sadece su ile yıkayarak akıtma işlemi yeterli olacaktır, farklı bir ürüne ihtiyaç duyulmaz. Yıkama işleminden sonra paspas ters çevrilerek, fazla sıvının akması için beklenir. Paspasın yeniden kullanılabilmesi için tamamen kurumasına gerek yoktur. Fazla sıvı aktıktan sonra, uygun miktarda dezenfektanlı solusyon eklenen paspas yeniden kullanılabilir.

RAMPALI HYPASS ÇEŞİTLERİMİZ

Üzerinden çeşitli servis ve taşıma araçlarının geçişine uygun olarak tasarlanan Rampalı HyPass'in, dış haznesi ve rampası paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

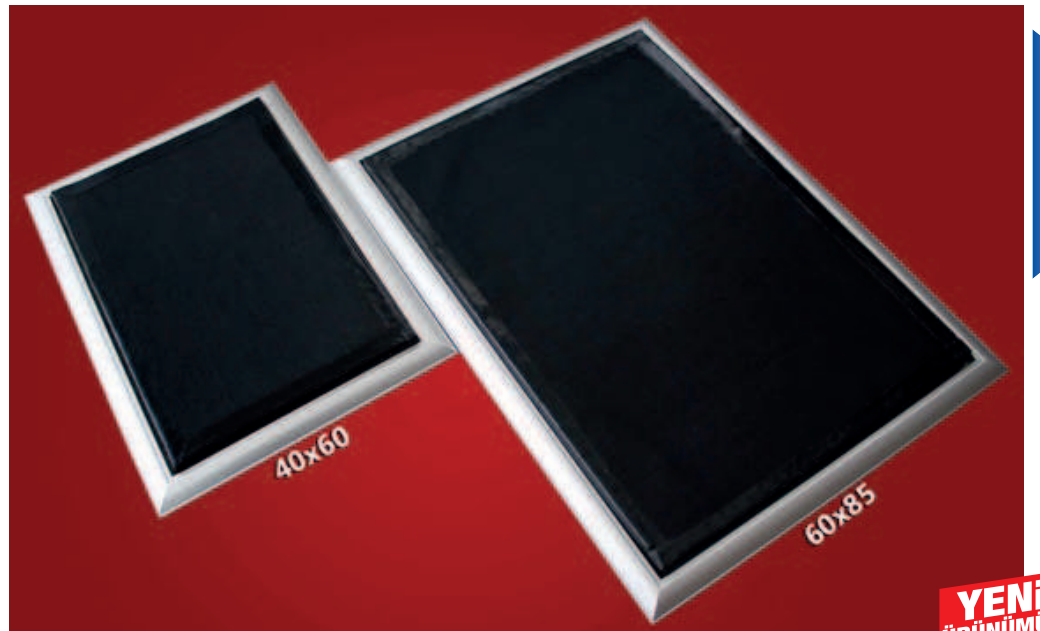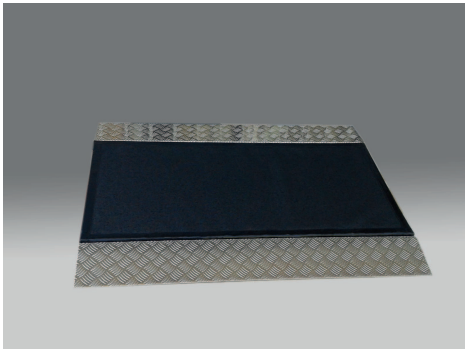

**YENİ
ÜRÜNÜMÜZ**

DiaTek Diagnostik Ürünler Teknik Dan. Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.

Tel : 0216 380 55 73 - 0216 611 05 03

Gsm : 0541 410 28 50

Fax : 0216 372 80 32

www.diatek.com.tr
bilgi@diatek.com.tr

